

Bedienungsanleitung cadWeazle TeamUp

Ausgabe Oktober 2021



Diese Bedienungsanleitung ist vor der ersten Inbetriebnahme zu lesen und zu beachten. Kinder lesen diese Bedienungsanleitung vor der ersten Fahrt zusammen mit ihren Eltern bzw. einer Aufsichts- oder Begleitperson.

Was der cadWeazle TeamUp ist und für wen er geeignet ist

Der *cadWeazle TeamUp* ist geeignet für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wie z. B. ältere oder körperlich stark eingeschränkte Menschen. Es soll ihnen ermöglicht werden, sich an einem Strand oder auf Wald- und Wiesenwegen fortzubewegen. Der *cadWeazle TeamUp* wird allerdings nicht eigenständig gesteuert, sondern von einer weiteren Person geführt. Diese soll durch einen elektrischen Antrieb unterstützt und entlastet werden.

Die Einbindung einer zweiten Person ermöglicht es, ein größeres Spektrum von Menschen zu erreichen, da das Fahrzeug auch für Menschen mit geistiger oder starker körperlicher Behinderung geeignet ist.

Übergabe und Einweisung

Eine umfassende Einweisung findet bei der Übergabe durch den Fachhändler bzw. durch den Anlieferer/Verleiher statt.

Sollten Ihnen im Nachhinein noch Fragen gekommen sein, oder sind Sie in irgendeinem Punkt unsicher, wenden Sie sich vor der ersten Ausfahrt vertrauensvoll an Ihren Händler/Verleiher.

Bremsen

Der *cadWeazle TeamUp* ist mit elektromechanischen Bremsen ausgestattet, die das Geländemobil wirkungsvoll zum Stehen bringen.

Sobald der Gasdrehgriff losgelassen wird, fängt die Bremse an zu greifen und das Fahrzeug wird bis zum Stillstand abgebremst.

Diese Bremse gilt gleichzeitig als Parkbremse, sobald das Fahrzeug steht.

Durch Betätigen des Hebels am Antriebsmotor kann das Fahrzeug bei ausgeschaltetem Motor in den Leerlauf gebracht werden. So kann das Fahrzeug von Hand geschoben werden.

Achtung Unfallgefahr!

Entriegeln Sie die Bremsen nur auf ebenem Untergrund. Sichern Sie das Fahrzeug gegen Wegrollen.

Mit entriegelter Bremse beginnt *cadWeazle TeamUp* eventuell SOFORT zu rollen!

Übersetzen in den *cadWeazle TeamUp*

Sie können entweder von einer der Rollstuhlseiten, oder von vorn in Ihren *cadWeazle TeamUp* überwechseln. Schwenken Sie die Armlehnen durch leichtes Lösen des Handrades zur Seite. Nun ist der Weg für das seitliche Überwechseln frei. Falls Sie ein Rutschbrett gewohnt sind, können Sie dieses auch hier verwenden.

Fahrzeug beim Übersetzen unbedingt ausschalten!

Luftdruck der Reifen

Der Luftdruck der Ballonräder kann der Beschaffenheit des Untergrundes angepasst werden. Im Bereich von 0,3 - 0,7 bar können Sie den Betriebsdruck der Reifen nach folgender Grundregel variieren:

Je weicher der Untergrund desto geringer der Reifendruck !

Wir verwenden in den Rädern handelsübliche Autoventile, d.h. Sie können an jeder Tankstelle den Reifendruck kontrollieren.

Der *cadWeazle TeamUp* wird werkseitig mit einem Reifendruck von 0,5-0,7 bar ausgeliefert.

Auf extrem weichem Untergrund (trockener Strandsand) kann es sinnvoll sein, den Betriebsdruck der Reifen auf 0,2 – 0,3 bar abzusenken. Der Reifen ist dann so weich, dass Sie ihn mit dem Fuß eindrücken können. Der minimale Luftdruck ist erreicht, wenn die Flanken des Reifen beginnen einzufallen.

Garantie

Diese Garantieerklärung bezieht sich nur auf das Fahrzeug *cadWeazle TeamUp*.

Die Garantiezeit für Mängel, die auf Material- oder Herstellerfehler zurückzuführen sind, beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Verschleißteile und Folgeschäden sind nicht im Rahmen der Garantie abgedeckt.

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Änderungen am Fahrzeug, die über die in dieser Anleitung dargestellten Möglichkeiten hinausgehen, nicht mehr von uns als Hersteller verantwortet werden.

Ebenso erlischt die Garantie durch unsachgemäßen Gebrauch wie z.B. ins Wasser fahren, den Verbau von Nichtoriginalteilen, sowie im Falle der Einflussnahme von unautorisiertem Wartungspersonal. Zudem erlischt die Garantie durch Öffnen von jeglichen elektronischen Komponenten, wie Motor, Antriebselektronik, Joystick etc.

cadWeazle TeamUp – Technische Daten

Maße gesamt	128,7 x 99,4 x 132,8 cm
Sitzbreite	47 cm
Sitztiefe	45 cm
Sitzhöhe	62 cm
Rückenlehnenhöhe	62,5 cm
Armlehnenlänge	38,5
Radabmessung	21"x12" ca. 56 cm x 26 cm
Zulässiges Gewicht	max. 120 kg
Gewicht, fahrbereit mit Batterien	ca. 90kg
Armlehne schwenkbar (ohne Werkzeug)	ja
Rückenlehne abnehmbar	ja
Bezüge abnehmbar	ja
Nackenrolle	ja
4 Punkt Sicherheitsgurt	ja
Bremsen	elektromechanisch
Batterien	RELION RB24V40 Lithium Battery
Reichweite (fester Untergrund)	ca. 3 Stunden
Reichweite (loser Untergrund)	1,5 Stunden
Max. Geschwindigkeit	6 km/h